



RESISTENTI
AGLI IMPATTI



ROBUSTI



LAVABILI

PLS 001

PANNELLO LAVAGGIO E SANIFICAZIONE



ENCLARA
MEDICAL

Il pannello doccia PLS 001 offre tutte le funzioni necessarie al lavaggio dei pazienti ed alla sanificazione degli ausili da essi utilizzati. E' il complemento ideale per le sedie, barelle e vasche doccia Enclara Medical.

STRUTTURA

La struttura del pannello è realizzata in acciaio zincato, verniciato con polveri epossidiche anticorrosione.

DOCETTE

PLS 001 è dotato di due doccette separate con tubi di colore diverso, bianco per il lavaggio del paziente e giallo per la sanificazione degli ausili. L'impugnatura è attentamente dimensionata per garantire una presa confortevole ed ergonomica. Il pulsante shut-off sulla doccetta stessa consente di aprire e chiudere il getto d'acqua comodamente e rapidamente.

MISCELATORE

Il miscelatore termostatico mantiene la temperatura dell'acqua sempre costante per tutta la durata della doccia. Il blocco di sicurezza alla temperatura massima di 38°C garantisce dal rischio di scottature.

SANIFICAZIONE

Il pannello miscela automaticamente acqua e disinfettante. Un flussimetro consente di regolare la concentrazione secondo le specifiche del produttore. Per evitare usi impropri, il contenitore del disinfettante è alloggiato in un supporto con chiusura a vite e serratura. PLS 001 è fornito in versione standard per installazione a muro. Il piedistallo è un accessorio disponibile su richiesta.



Doccette



Miscelatore



Installazione a parete



Dispenser sanificante